

Estetoscópio simples Premium pediátrico

O Estetoscópio Premium é indicado para a ausculta não invasiva dos ruídos e sons produzidos pelo sistema cardiorrespiratório e órgãos internos ao organismo. Os sons são obtidos através do contato do auscultador com a região de interesse. Os sons captados pelos receptores são conduzidos pelo tubo e hastes até as olivas e o conduto auditivo.

CADASTRO DE PRODUTO

Código: ESTSPEP

- EAN 13: 7898301050694
- Clas. Fiscal: 90189099
- EMBALAGEM DE EMBARQUE: 100 UM



PESO (kg)		VOLUME (cm) (L x C x A)	
COM EMB.	SEM EMB.	COM EMB.	SEM EMB.
0,11	0,08	10 x 19 x 2,2	6,8 x 81 x 1,5

PESO CAIXA-MÃE (kg)		VOLUME CAIXA-MÃE (L x C x A) (EMBALAGEM DE EMBARQUE)	QUANTIDADE /CAIXA (EMBALAGEM DE EMBARQUE)
BRUTO	LÍQUIDO		
14	13	53 x 41 x 25	100

Formas de apresentação do produto

Modelos: Simples Adulto e Simples Pediátrico



- 1- Membrana de plástico PVC rígido;
- 2- Anel rosqueado de alumínio;
- 3- Auscultador Simples de liga de alumínio;
- 4- Tubo em formato de "Y" de PVC;
- 5- Mola de aço inoxidável;
- 6- Fone/ Haste biauricular de alumínio;
- 7- Par de Olivas macias em plástico de PVC.

Instruções de Uso

- Encaixar o fone biauricular nos ouvidos de maneira a isolar todos os sons externos.
 - Encostar o diafragma na área a ser analisada.
 - Esfregue levemente o diafragma para saber se as olivas estão posicionadas corretamente nos ouvidos.
- Se não houver som de vibração, gire a câmara de som em 180° e escute o som, bata suavemente no diafragma pelo lado oposto, escute a vibração, que identificará se o estetoscópio poderá ser usado.