



Seringa Hipodérmica Descarpack

DESCRIÇÃO

As **Seringas Hipodérmicas Descarpack** foram desenvolvidas para uso manual, sendo um produto estéril, atóxico, apirogênico e de uso único.

Confeccionadas com polímero plástico inerte, não interagindo com medicamentos. Contam com cilindro transparente, para melhor visualização do nível do medicamento, além de facilitar a detecção de possíveis impurezas.

Possuem lubrificante de alta qualidade, o que garante um movimento suave do êmbolo, reduzindo a pressão exigida durante a manipulação do produto. Contam com trava para controle do deslizamento, o que previne a separação entre a haste e o cilindro, prevenindo vazamentos.

As **Seringas Hipodérmicas Descarpack** são certificadas pelo INMETRO.

PRODUTO



Cadastro na ANVISA Seringa Hipodérmica Luer Slip/Luer Lock Descarpack: 10330669025
Fabricante: Lifelong Meditech Ltd.

Cadastro na ANVISA Seringa Hipodérmica 5 mL Luer Slip Descarpack: 10330660103
Fabricante: Lifelong Meditech Ltd.

Cadastro na ANVISA Seringa Hipodérmica 1 mL Luer Slip Descarpack: 10330669069
Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

Cadastro na ANVISA Seringa Hipodérmica 60 mL Luer Slip/Luer Lock Descarpack: 10330669069
Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

As **Seringas Hipodérmicas Descarpack** foram desenvolvidas para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa, e em diferentes formas farmacêuticas, podendo ser: veículos aquosos, veículos oleosos, pó em suspensão e pó para ressuspender/reconstituir.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Seringas Hipodérmicas Descarpack** estão disponíveis nos modelos Luer Slip e Luer Lock e nos tamanhos: 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL e 60 mL.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Cilindro:** Polipropileno;
- ❖ **Haste:** Polietileno;
- ❖ **Pistão:** Borracha Termoplástica;
- ❖ **Lubrificante:** Polidimetilsiloxano, concentração $\geq 0,25$ mg/cm².

VALIDADE

05 (cinco) anos após a data de esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Seringa Hipodérmica Luer Slip Descarpack

Modelo	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
1 mL	0320901	100 unidades	30 cartuchos
3 mL	0324101	100 unidades	40 cartuchos
5 mL	0324301	100 unidades	28 cartuchos
10 mL	0324501	100 unidades	20 cartuchos
20 mL	0324701	50 unidades	24 cartuchos
60 mL	0323101	25 unidades	12 cartuchos

Seringa Hipodérmica Luer Lock Descarpack

Modelo	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
3 mL	0324201	100 unidades	40 cartuchos
5 mL	0324401	100 unidades	28 cartuchos

10 mL	0324601	100 unidades	20 cartuchos
20 mL	0324801	50 unidades	24 cartuchos
60 mL	0323201	25 unidades	12 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade;
- ❖ Abrir a embalagem de forma asséptica;
- ❖ Conectar a agulha;
- ❖ Retirar o protetor da agulha e aspire o medicamento;
- ❖ Ajustar o volume;
- ❖ Realizar antissepsia do local;
- ❖ Após o uso descartar em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- ❖ Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- ❖ Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- ❖ Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Produto médico-hospitalar de uso único;
- ❖ Após o uso descartar em local apropriado;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.