



LIK LUC PUERICULTURA EIRELI

INSTRUÇÕES DE USO

ADESIVO REFRESCANTE PARA FEBRE EM GEL



Importado e distribuído por:

Likluc Puericultura EIRELI

CNPJ: 26.090.108/0001-06

Rua Francisco Muñoz Madrid, 625, Bl. 404, sala 2, São José dos Pinhais-PR. CEP: 83.070-152

AFE Nº: 8.15.250-9

Site: <https://likluc.com.br/>

Este produto não é um medicamento. Se a febre persistir entre em contato com seu médico. Este produto não deve ser reutilizado. No caso de ingestão acidental procure ajuda médica

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR DEPOIS DO USO.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Armazenar em local seco e arejado. Manter protegido de luz, umidade e temperaturas altas. Manter fora do alcance de crianças.

Proteger da luz, umidade e temperaturas altas. Transportar sem violar a embalagem

Manual de Instruções

Nome Técnico: Adesivo em gel.

Nome Comercial: adesivo refrescante para febre em gel.

Registro ANVISA Nº: 81525090004.

Validade: 36 meses.



LIK LUC PUERICULTURA EIRELI

Validade depois de aberto: uso único e imediato de cada adesivo (depois de aberto o envelope, a evaporação da água ocorre gradualmente).

Fabricado por: Henan Kandgi Medical Devices CO. LTD

4, 2nd Area, SME Pioneer Park, Industry Cluster Zone, Huaiyang County, Zhoulou, Henan, Popular Republic of China.

Modelo

Referência	Descrição do Produto	Compr.	Largura
58	adesivo refrescante para febre em gel	5 cm	12 cm

Cor: azul.

Forma de Apresentação

Cada adesivo em gel está acondicionado individualmente em invólucro selado de folha de alumínio e plástico (embalagem primária). Os invólucros são acondicionados dentro de uma caixa de papelão com impressão da arte e instruções (embalagem secundária). As dimensões da caixa de papelão são: 17cm x 10cm x 1,5cm. O produto é comercializado em caixas (embalagem secundária) com 1, 2, 4, 6 ou 8 adesivos em gel.

Composição

O adesivo refrescante para febre em gel é composto basicamente por água, glicerina, poliacrilatos de sódio e amônio e corante azul.

Indicação de Uso / Finalidade

O adesivo refrescante para febre em gel é indicado para promover efeito refrescante e troca térmica sobre a pele para alívio do desconforto da febre. O produto é utilizado na testa, peito ou costas.

Modo de uso do produto

Retirar a película transparente do adesivo em gel e aplicar sobre a pele seca no local indicado (testa, costas ou peito). Para melhores resultados, o adesivo deverá ser utilizado apenas uma vez e ser descartado depois do uso. O efeito de evaporação refrescante dura por até 8 horas.

Condições de Manipulação

Antes de utilizar o adesivo refrescante para febre em gel, avalie a integridade do produto.

Leia atentamente todas as recomendações para utilização do produto.

Produto descartável e que pode ser descartado em lixo comum.

Advertências

Este produto não é um medicamento. Se a febre persistir entre em contato com seu médico. Este produto não deve ser reutilizado. No caso de ingestão acidental procure ajuda médica.



LIKLUC PUERICULTURA EIRELI

- O produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas que possam causar danos ao usuário.
- Não utilize o adesivo refrescante para febre em gel caso apresente qualquer tipo de avaria.

Precauções

Use apenas como indicado. Somente uso externo. Não aplicar em feridas ou em pele irritada. Evite contato direto com os olhos, mucosa nasal e bucal. Descontinuar o uso se ocorrer erupções cutâneas, vermelhidão, coceira ou irritação na pele onde foi aplicado, e consulte um médico imediatamente. Sempre que utilizado em crianças, é necessária a supervisão de um adulto. Para evitar risco de sufocamento, quando utilizado por crianças, nunca permita que seja introduzido ou bloqueie a boca ou o nariz. Quando a temperatura do corpo ultrapassar os 39 °C procure assistência médica.

- Antes de utilizar o produto, verifique se há alguma avaria.

Contraindicações e efeitos adversos

Não há. Não possui efeitos medicamentosos.

Responsável Legal: Stefania Oriola Lucchese

Responsável Técnico: Eng^a Ambiental Renata Dias Ferrante – CRQ 09904713-IX