

POTENZA BIANCO H2O2

INSTRUÇÕES DE USO PARA O PACIENTE



PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Sala 2, Bairro:
Atiradores, Cidade: Joinville, Estado: SC, País:
Brasil CEP: 89203-212
CNPJ: 17.910.389/0001-05
INDÚSTRIA BRASILEIRA
E-MAIL: vendas@phsdo brasil.com.br
Autorização de Funcionamento MS:
X401M5619X7L(8.11992.7)
Registro na ANVISA nº 8.11992.70022
Responsável Técnico: ANA LÚCIA ANTUNES
POLIZEL - CRQ/SC NR. 13404255



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsdo brasil.com.br

Nome comercial do produto: POTENZA BIANCO
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 6%, 7,5%, 9,5%.

Nome Técnico do Produto: AGENTES
CLAREADORES DENTAIS.

**LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES
DESTA INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR
O PRODUTO. GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ
NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO
COM O SEU PACIENTE.**

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Peróxido de hidrogênio, espessantes e água
deionizada, dessensibilizantes e umectante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
foi desenvolvido baseado em produtos já conhecidos
mundialmente e altamente recomendados para
clareamento de dentes vitais. Sua fórmula combina a
alta viscosidade do gel de Carbômero com o princípio
ativo do Peróxido de Hidrogênio.

Sua formulação ainda contém umectante Glicerol e
alto teor de água que ajudam a prevenir a
desidratação dental. O tempo do tratamento pode
variar de paciente para paciente, de acordo com o
grau de sensibilidade, cor do remanescente dental,
concentração do clareador, entre outros fatores. O
tempo médio para resultado é de 15 dias quando
utilizado o gel clareador diariamente.

O gel clareador **POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO** está disponível em várias
concentrações para satisfazer todas as suas
necessidades.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO é
indicado para clareamento de dentes vitais e não
vitais com base na técnica de clareamento dental de
uso caseiro supervisionado pelo dentista.

POTENZA BIANCO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO é
efetivo no clareamento de dentes vitais em pacientes
jovens (maiores de 15 anos), dentes vitais
naturalmente escuros ou amarelados, dentes vitais
escurecidos pelo envelhecimento, na remoção de
manchas extrínsecas causadas por pigmentos.

Os resultados contra manchas decorrentes de
fluorose e tetraciclina não são previsíveis, podendo
clarear dependendo de seu grau de complexidade.
Dentes não vitais podem clarear porém o resultado
não será tão efetivo como em dentes vitais, para
potencializar o clareamento em dentes não vitais
pode-se associar o clareamento interno.

PRECAUÇÕES:

Este produto só deve ser utilizado sob indicações e
orientações de um dentista. Evite fumar durante o
período do tratamento e, principalmente, não fume
imediatamente depois de retirada a moldeira. Durante
o tratamento, evite a ingestão de bebidas, frutas e
produtos ácidos (pois influenciam na sensibilidade
dental). Para evitar a pigmentação dos dentes,
recomenda-se a não ingestão de produtos que
contenham corantes fortes como: café, vinhos,
refrigerantes, beterraba, açafrão, chocolate, molhos e
industrializados, etc. Se ocorrer algum problema,
interrompa o tratamento e avise o seu dentista. Em
caso de reações alérgicas, comunicar seu dentista, ir
diretamente ao Pronto Atendimento junto com a
instrução de uso do produto. Produto não injetável.
Não reutilize a embalagem.

CONTRA INDICAÇÕES:

Pacientes grávidas, lactantes ou pacientes menores
de 15 anos. Pacientes com patologias periodontais.
Pacientes com rizogênese incompleta. Pacientes com
reação alérgica aos componentes da fórmula.

EFEITOS COLATERAIS:

Alguns pacientes podem apresentar sensibilidade
dental durante ou após o clareamento. Se o paciente
apresentar sensibilidade excessiva e desconforto,
deverá comunicar o dentista para obter orientações.

O clareamento pode realçar áreas de hipocalcificação
(hipoplasias) pré-existentes devido ao clareamento
mais intenso destas áreas. Em alguns casos, essas
manchas desaparecem devido à reidratação do
esmalte, após a conclusão do clareamento.

A ingestão de grandes quantidades do produto pode
causar náuseas.

IMPORTANTE:

O tratamento de clareamento dental deve ser
realizado apenas sob supervisão de um dentista. O
procedimento de clareamento dental é eficaz e seguro
se for realizado de forma apropriada e com os
produtos corretos. É comum ocorrer sensibilidade
dental durante o tratamento. Neste caso, se persistir
a sensibilidade, comunique seu dentista pois assim

ele poderá prescrever alguns tratamentos para sensibilidade dental.

ADVERTÊNCIA:

O uso do produto deverá ser recomendado pelo dentista, assim como suas orientações de uso e acompanhamento. Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado. Mantenha fora do alcance das crianças. Somente para uso odontológico. Antes de utilizar observe o aspecto do produto, caso perceba alguma anomalia entre em contato imediatamente com o fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso inadequado ou por manipulação incorreta. Este produto foi fabricado somente para uso odontológico e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. É de responsabilidade do profissional comprovar antes da utilização do produto se este produto é compatível e adequado para a utilização desejada. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para realizar o descarte do produto, siga a legislação local.

RECOMENDAÇÕES DE USO DE ACORDO COM A CONCENTRAÇÃO DO GEL:

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	TEMPO DE USO DIÁRIO
6%	2 HORAS
7,5%	1,5 HORAS
9,5%	1 HORA

ATENÇÃO:

O Dentista deverá monitorar e estipular o tempo de tratamento do clareamento dental.

Recomenda-se que o profissional selecione e registre a cor dos dentes do paciente através de uma escala de cores. Pode-se realizar protocolo fotográfico para acompanhamento do clareamento.

INSTRUÇÕES DE USO:

1º Passo: Após completa higiene bucal, prepare a moldeira para uso colocando um pouco do gel Potenza Bianco Peróxido de Hidrogênio na moldeira (no centro de cada dente que deverá ser clareado), pressionando o êmbolo da seringa cuidadosamente. A quantidade de gel que deve ser aplicado na moldeira é de, aproximadamente, uma gota para cada dente.

2º Passo: Coloque a moldeira na boca de forma que se encaixe nos dentes e que o gel entre em contato com toda a superfície dental. (Sem extravasar, para não entrar em contato com a gengiva e evitar irritação).

3º Passo: Caso ocorra vazamento do gel para a gengiva, lave as mãos e remova o excesso com os dedos, algodão, escova macia ou lenço higiênico. Se a quantidade aplicada na moldeira ultrapassar a quantidade recomendada pode ocorrer um vazamento excessivo. Nesses casos deve-se retirar a moldeira e fazer a remoção total do produto com o auxílio dos dedos, algodão ou lenço higiênico e bochecho com água em abundância. Reinicie todo o processo.

4º Passo: Deixe o produto agir pelo tempo indicado pelo seu dentista.

5º Passo: Após o tratamento, retire a moldeira. Enxágue a moldeira e a boca com água em abundância até a remoção total do gel. Lavar e secar a moldeira antes e após a cada utilização. Guarde a moldeira no porta moldeira.

6º Passo: Utilize o produto conforme instruções do seu dentista. Informe-o sobre qualquer desconforto ao longo do tratamento.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Manter o produto na embalagem original. Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 0 °C a 30 °C.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5°C e 50°C. Proteger da incidência da luz solar direta.

DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM.

PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO - (CONFORME RDC Nº 6 DE 2015).

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.



SIGA AS INSTRUÇÕES DE USO CORRETAMENTE



DESTINE APENAS À UTILIZAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO



MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS



EMBALAGEM RECICLÁVEL



VIDE MANUAL DE INSTRUÇÃO