



EXTENSÃO DE 4,5MTS COM 2 PONTAS



A Extensão Salter Labs é fabricada com mais alta tecnologia e com materiais de última geração.

A extensão de Cânula Nasal da Salter Labs com 4,50 metros de comprimento é utilizada para oferecer maior mobilidade e facilitar a locomoção do usuário de oxigênio domiciliar. As extremidades são flexíveis, permitindo a passagem de ar mesmo que seja dobrada.

A extensão é um produto médico de uso individual e não deve ser esterilizada. Faça a limpeza regular, deixando a extensão de molho em uma bacia com água e sabão neutro durante meia hora e depois enxague com água corrente. A extensão de oxigênio deve ser trocada sempre que não apresentar condições de uso.

MODO DE USAR: Conecte uma das extremidades da extensão na cânula nasal (não inclusa), e conecte a outra extremidade no concentrador, cilindro ou umidificador de oxigênio.

Conservar a extensão em local limpo, seco, sob temperatura abaixo de 30° e umidade relativa do ar de até 70%. A extensão é um produto médico de uso individual. Não tente limpar ou esterilizar a extensão.

Composição: PVC. Não contém látex

Prazo de validade: indeterminado

Fabricante: Salter Labs

Produto Estéril: Não

Uso único: Sim

Respirox Comércio de Oxigênio Ltda – EPP
Rua Conselheiro Saraiva, 674 – Santana – SP/SP Cep: 02037-021
Fone(11) 2978-3344 Watzap (11)99430-8118
E-mail: respirox@respirox.com.br