

Modelo**3268NR - MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE COM HEPARINA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE 500UL****Características**

O MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE é utilizado como um apoio à coleta de sangue feita através de punção capilar.

O tubo com HEPARINA é indicado para acondicionamento da amostra de sangue e inibe sua coagulação, assim permitindo que a amostra seja preservada por um período mais longo sem alteração do seu estado original.

INSTRUÇÕES DE USO

A coleta da amostra de sangue deve ser efetuada de acordo com o protocolo da unidade de saúde.

Após a coleta:

1. Abrir a tampa do tubo;
2. Transferir o sangue até a indicação de volume do tubo;
3. Fechar o tubo com a tampa;
4. Agitar o tubo delicadamente de 5 a 8 vezes, por inversão de 180°;
5. Encaminhar a amostra para o local onde será realizada a análise.

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado
Registro(s) MS 10379860110, 10379860215

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479